

# cystistat®

## STERIELE NATRIUM HYALURONAAT OPLOSSING

Om tijdelijk de glycosaminoglycanen-laag (GAG) in de blaas te vervangen.

**BESCHRIJVING:** Aangenomen wordt dat de glycosaminoglycanen-laag (GAG) die de lumenale zijde van de blaaswand bedekt, een beschermende barrière vormt tegen microorganismen, carcinogenen, kristallen en andere stoffen in de urine.<sup>1</sup> Het is aangetoond dat de GAG-laag het belangrijkste afweermechanisme vormt bij de bescherming van het overgangsepitheel van de prikkelende stoffen in de urine. Wanneer de GAG-laag van het blaasepitheel aangetast is, kan ze verhinderd worden om haar barrièretaak te vervullen, waardoor er zich bacteriën, microkristallen, eiwitten en ionen aan vasthechten of er ionische en niet-ionische (bv. ureum) restoplossingen door kunnen.<sup>2</sup> CYSTISTAT® is een oplossing die bestemd is om de aangetaste GAG-laag van het blaasepitheel tijdelijk te vervangen. De actieve substantie is zeer gezuiverd natriumzout van hyaluronzuur.

**Eén flesje CYSTISTAT® bevat:** 40 mg natriumhyaluronaat.

**GEBRUIKSWIJZE:** Druppel de hele oplossing in de blaas na eliminatie van de resturine. Gooi alle niet-gebruikte resten weg. Om betere resultaten te krijgen, moet CYSTISTAT® zo lang mogelijk in de blaas blijven (minstens 30 minuten).

Er zijn aanwijzingen dat de GAG-laag van de blaas in geval van cystitis deficiënt is. Deze deficiëntie draagt bij tot de klinische symptomen<sup>2</sup> van ziekten zoals interstitiële cystitis<sup>3</sup>, cystitis als gevolg van infecties, trauma, urolithiase, urineretentie, neoplasie en cystitis als gevolg van bestraling<sup>4</sup>. Om cystitis in het kader van deze aandoeningen te verlichten wordt aanbevolen CYSTISTAT® gedurende 4-12 weken elke week in de blaas te instilleren en vervolgens om de maand tot de symptomen verdwenen zijn. De behandelende arts, uroloog of radioloog moet beslissen over het profylactische gebruik van CYSTISTAT®.

**VOORZORGSMAATREGELEN:** Dien CYSTISTAT® niet toe aan patiënten met overgevoelighedsreacties. Staak het gebruik als zich bijwerkingen voordoen. Daar er geen klinische gegevens zijn van het gebruik van hyaluronzuur bij kinderen, zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding, is de behandeling met CYSTISTAT® niet aanbevolen bij deze patiënten.

**WAARSCHUWING:** BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

**BEWARING:** Bewaren op kamertemperatuur (15° - 30°C).

Niet invriezen.

**VERPAKKING:** 1 flesje van 50 ml van CYSTISTAT® 40 mg.

**Niet geschikt voor hergebruik. Weggooien na gebruik.**

**Bijgewerkte versie:** July 2000.

**Revise:** April 2013.

 Mylan Institutional, Inverin, Co. Galway, Ireland.

© Mylan Teoranta, Ireland.